

<b>Erstuntersuchung</b>	<b>Zweituntersuchung</b>	<b>Nachbefundung</b>
Gerät und PC einschalten und Programm starten	Gerät und PC einschalten und Programm starten	Gerät und PC Einschalten und Programm starten
<b>„Fallauswahl“</b>	<b>„Fallauswahl“</b>	<b>„Fallauswahl“</b>
	Bereits bekannten Patienten auswählen und laden	Bereits bekannten Patienten auswählen und laden
<b>„neuer Patient“</b>	<b>Patientendaten &amp; Geräteparameter „neu zu aktuellem Patient“</b>	
Patientendaten und Untersucher eintragen	Untersucherinformation überprüfen und ggf. ändern	
Kontrolle Geräteparameter	Kontrolle Geräteparameter	
<b>„weiter zur Bilderfassung“</b>	<b>„weiter zur Bilderfassung“</b>	
Optional <b>„Kameravorschau starten“ / „Kameravorschau beenden“</b>	Optional <b>„Kameravorschau starten“ / „Kameravorschau beenden“</b>	
<b>„Bilderfassung starten“</b>	<b>„Bilderfassung starten“</b>	
Nach 10 Sek. ICG-Injektion	Nach 10 Sek. ICG-Injektion	
Untergrundsignal festlegen; mit „OK“ bestätigen	Untergrundsignal festlegen; mit „OK“ bestätigen	
Befund beurteilen	Befund beurteilen	
Befundfenster öffnen	Befundfenster öffnen	Befundfenster öffnen
Mit linker Maustaste Einzelbefund markieren	Mit linker Maustaste Einzelbefund markieren	Markiere <b>„Befundzeile“</b> mit Linker Maustaste
<b>„Speichere Befund“</b>	<b>„Speichere Befund“</b>	<b>„Lösche Befund“</b>
<b>„Drucke Befund“</b>	<b>„Drucke Befund“</b>	<b>„Speichere Befund“</b>